



COVIDIEN

positive results for life™



Sistema Nellcor™ palmare per il monitoraggio della SpO₂


In-service presentation

Panoramica del saturimetro

Pannello frontale




Display del monitor

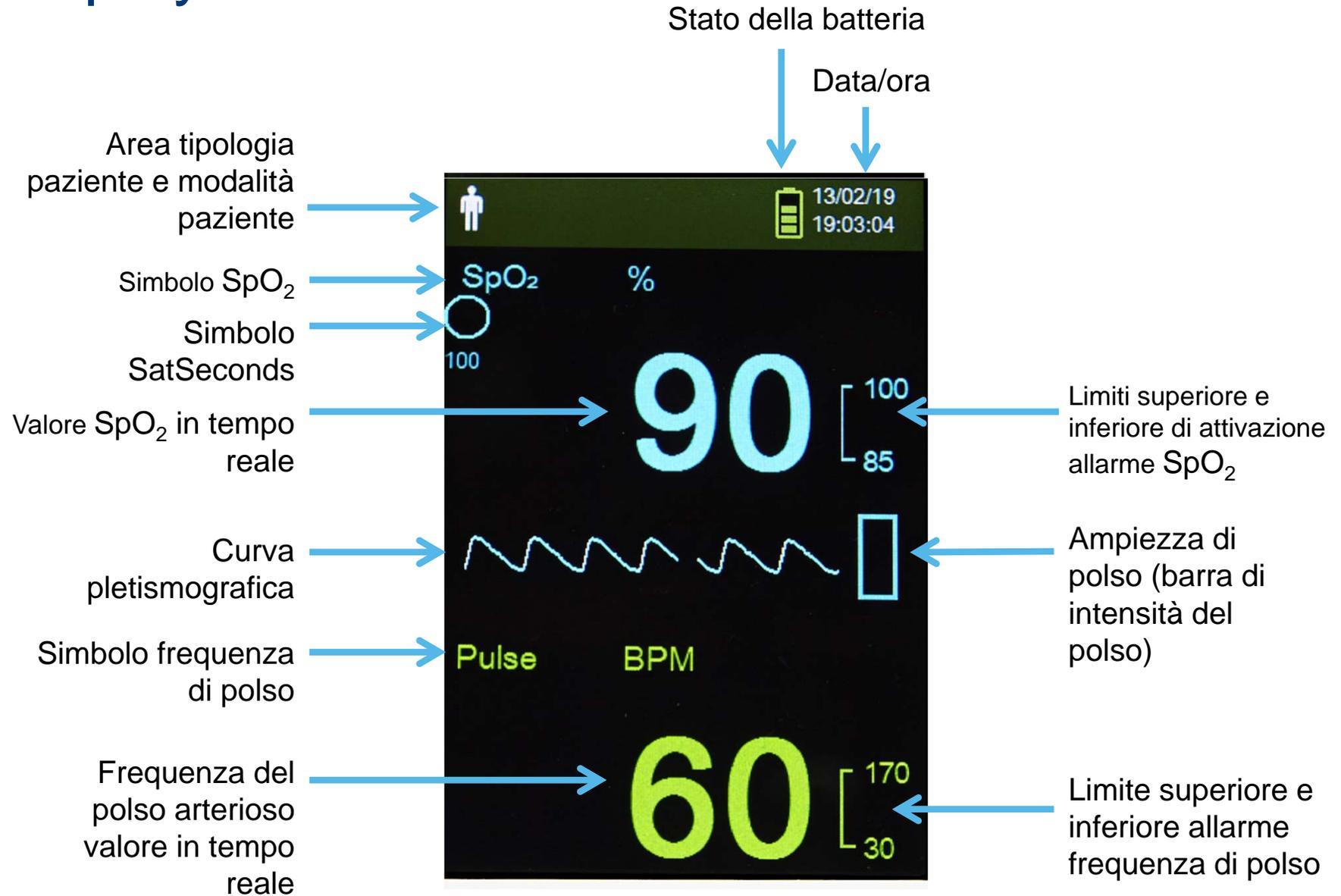

Componenti pannello posteriore



Batteria
coperchio di
accesso

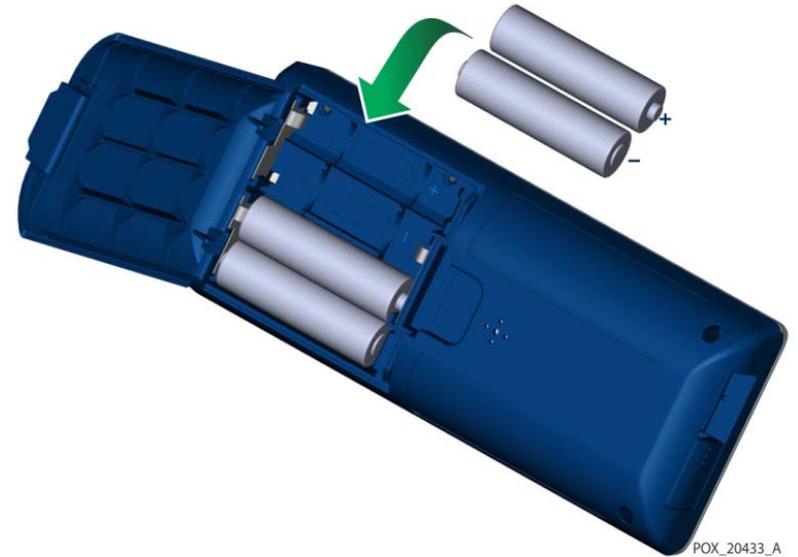


Monitoraggio del paziente

Monitoraggio del paziente - impostazione modalità paziente

Selezionare la modalità paziente: adulto o neonato.

Per selezionare la modalità paziente:

1. Premere il tasto Menu.
2. Selezionare Modifica modalità paziente e premere il tasto OK.
3. Selezionare la modalità paziente corretta (adulto o neonato).
4. Premere il tasto OK per confermare.

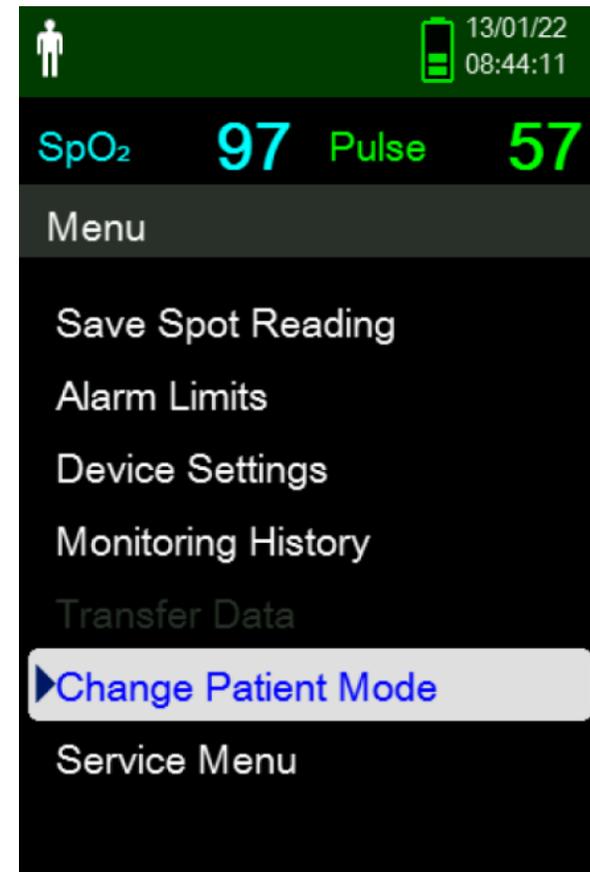


POX_20308_A

Monitoraggio del paziente - Salvataggio di una lettura

La funzione Salvataggio lettura spot salva i dati del paziente in un momento specifico.

Per salvare una lettura spot:

1. Premere il tasto Menu.
2. Spostarsi su Salvataggio lettura.
3. Premere il tasto OK.
4. Spostarsi su Cronologia monitoraggio per visualizzare le letture salvate.

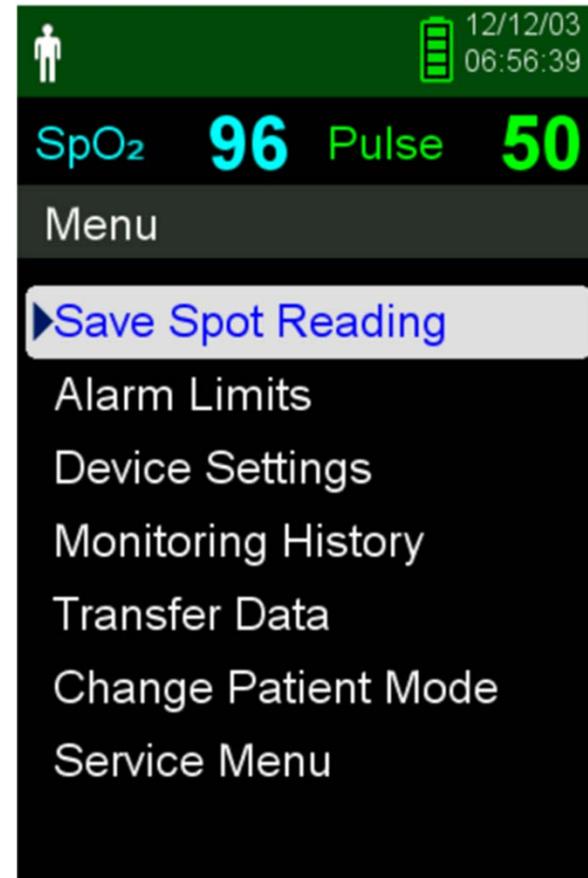



POX_20358_A

Gestione degli allarmi e dei limiti di allarme

Impostazione e regolazione dei limiti di allarme

Per impostare i limiti di allarme:


1. Premere il tasto Menu.
2. Premere il tasto Giù e il tasto OK per selezionare il menu dei Limiti di allarme. Le impostazioni degli allarmi includono:
 - Frequenza del polso arterioso (pulse rate, PR) e intervalli limiti di allarmi SpO₂
 - Opzione SatSeconds
3. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione desiderata.
4. Premere il tasto OK per selezionare l'opzione desiderata.
5. Premere il tasto Su o Giù per modificare il valore.
6. Premere il tasto OK per salvare.
7. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare un'altra opzione, oppure premere il tasto indietro per tornare al menu principale.

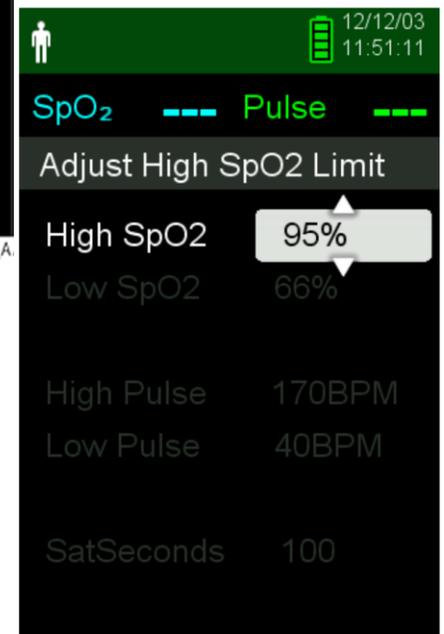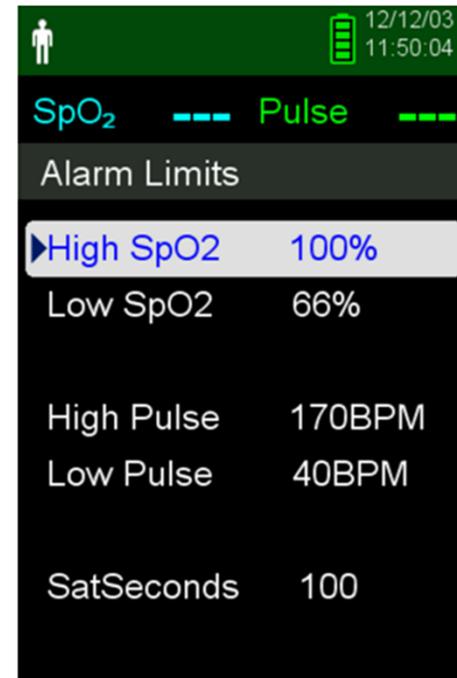

Sistema di gestione allarme SatSeconds

Per impostare SatSeconds:

1. Premere il tasto Menu.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare il menu Limiti allarme e premere OK per selezionare.
3. Nel menu Limiti allarme, premere il tasto Giù per evidenziare SatSeconds.
4. Premere la freccia Giù per cambiare i valori di SatSeconds a 50, 25, 10 o spento (il valore predefinito è 100).
5. Premere OK per selezionare il valore.

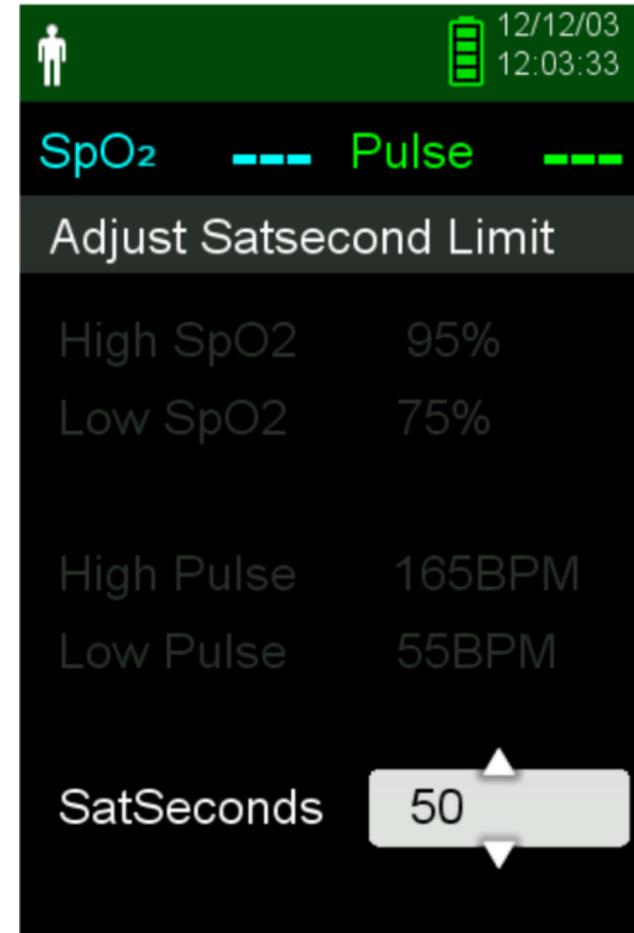

POX_20357_A


Modalità paziente supplementari

Impostazione modalità di risposta

La Modalità di risposta definisce l'intervallo al quale il sistema di monitoraggio risponde alle variazioni nelle letture di SpO₂.

Per impostare la Modalità di risposta:

1. Accedere al menu Modifica modalità paziente.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare il menu Modalità di risposta, poi premere il tasto OK per selezionare la Modalità di risposta.
3. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare normale o rapida, poi premere il tasto OK per confermare la selezione.
 - Normale - Risponde alle variazioni di saturazione di ossigeno nel sangue entro 5-7 secondi.
 - Rapida - Risponde alle variazioni di saturazione di ossigeno nel sangue entro 2-4 secondi.

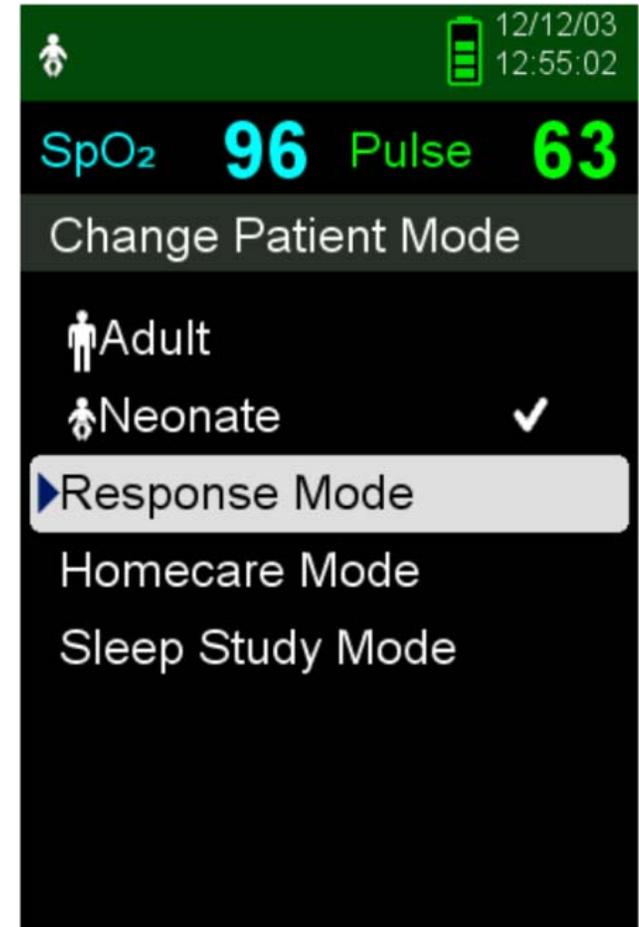


POX_20353_A

Impostazione Modalità cure a domicilio

Impostare il sistema di monitoraggio in Modalità Homecare quando una persona non professionista deve utilizzare il sistema di monitoraggio al di fuori di un ospedale o di un centro medico.

Per impostare la Modalità Homecare:


1. Accedere al menu Modifica modalità paziente.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare il menu Modalità Homecare, poi premere il tasto OK per selezionare la Modalità Homecare.

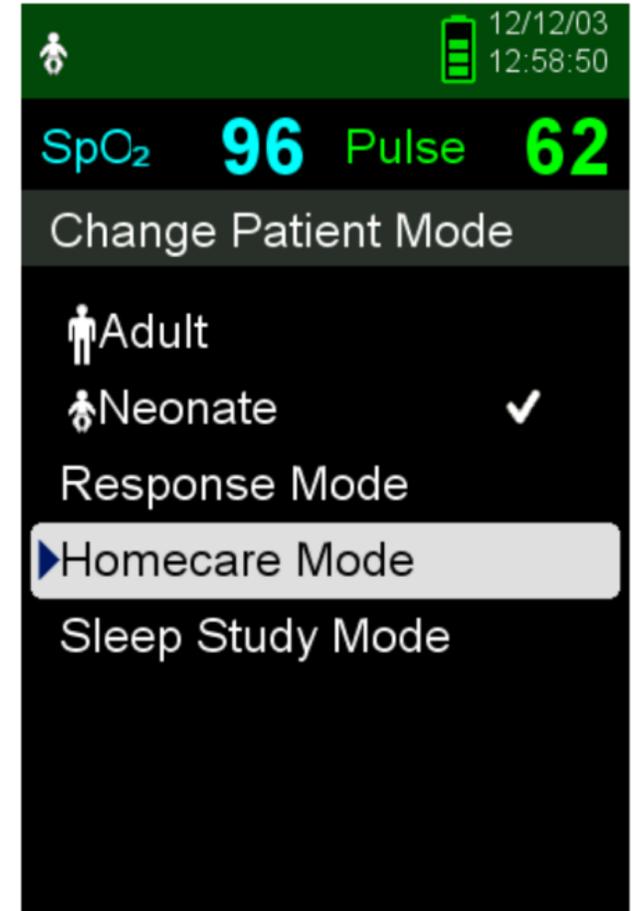


POX_20328_A

Impostazione Modalità Homecare

1. Impostare un codice a quattro cifre per la Modalità cure a domicilio. Utilizzare le frecce Su e Giù per modificare il valore di ogni cifra, poi premere il tasto OK per selezionare il valore.
2. Dopo aver inserito il codice a quattro cifre, selezionare Conferma per entrare in Modalità cure a domicilio.
3. Quando viene richiesto di eliminare i dati trend, selezionare no o sì.

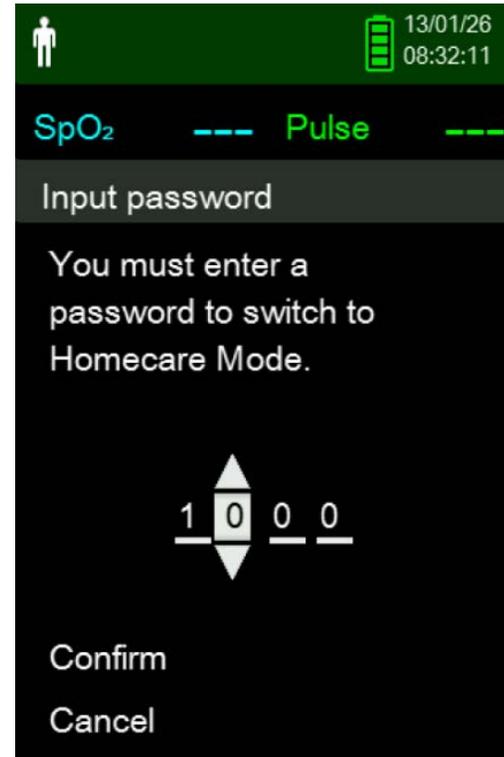

POX_20344_A

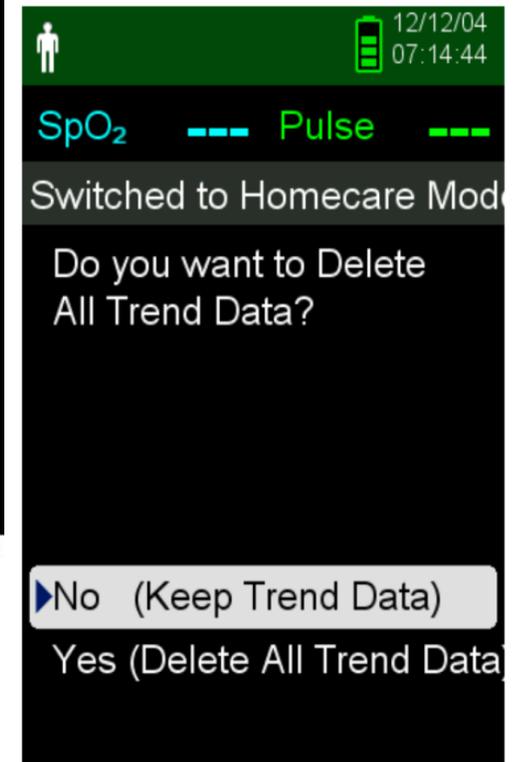


POX_20326_A

Impostazione Modalità Homecare (continua)

Il sistema di monitoraggio funziona ora in Modalità Homecare

Per tornare alla Modalità standard, entrare nel menu Modalità paziente e inserire il codice a quattro cifre per la Modalità standard.

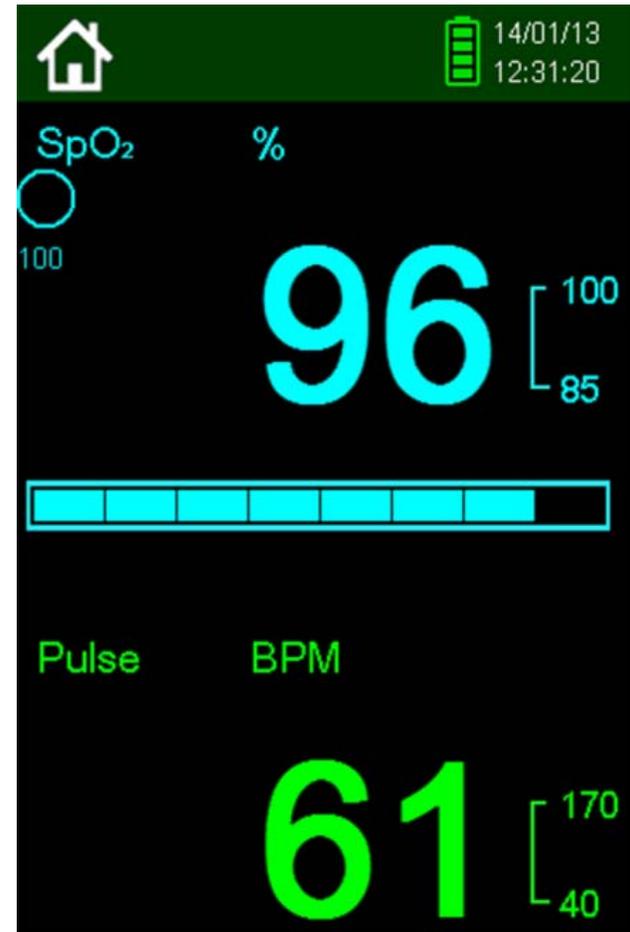



POX_20391_A

Impostazione Modalità studio del sonno

Impostare il sistema di monitoraggio in Modalità studio del sonno quando viene studiato il sonno in un paziente (gli allarmi sonori sono disattivati e l'intensità luminosa dello schermo si affievolisce).

Per impostare la Modalità studio del sonno:

1. Accedere al menu Modifica modalità paziente.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare il menu Modalità studio del sonno, poi premere il tasto OK per selezionare la Modalità studio del sonno.
3. Inserire il codice a quattro cifre per la Modalità studio del sonno.
4. Dopo aver inserito il codice a quattro cifre, selezionare Conferma per entrare in Modalità studio del sonno.

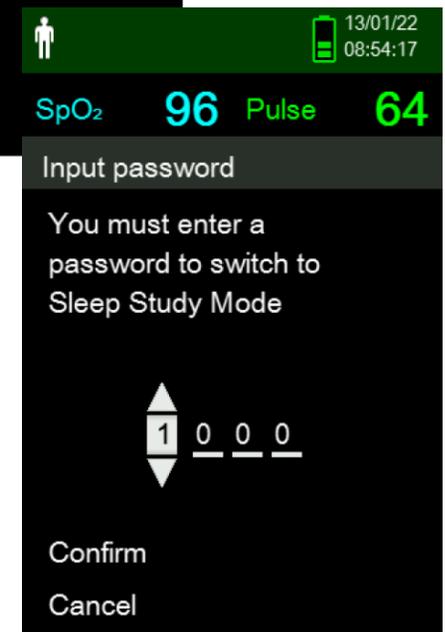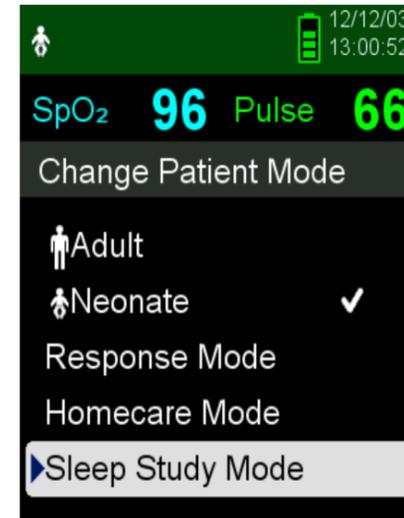


POX_20402_A



Impostazione Modalità studio del sonno

Quando non viene più premuto alcun tasto per tre minuti, l'intensità luminosa dello schermo si affievolisce.

1. Per riaccendere lo schermo, premere un tasto qualsiasi.
2. Per tornare alla Modalità standard, entrare di nuovo nel menu Modalità paziente e inserire il codice a quattro cifre per la Modalità standard.

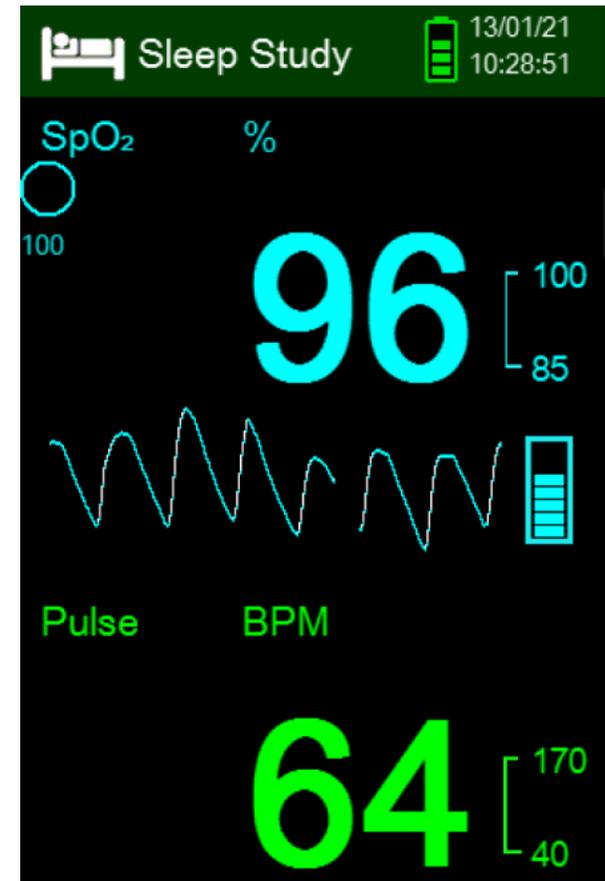


POX_20400_A

Regolazione della luminosità e del volume

Accedere al menu Impostazioni dispositivo per regolare il volume e la luminosità del sistema di monitoraggio.

Per accedere al menu Impostazioni del dispositivo:

1. Premere il tasto Menu.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare il menu Impostazioni del dispositivo e premere il tasto OK per selezionare Impostazioni del dispositivo.

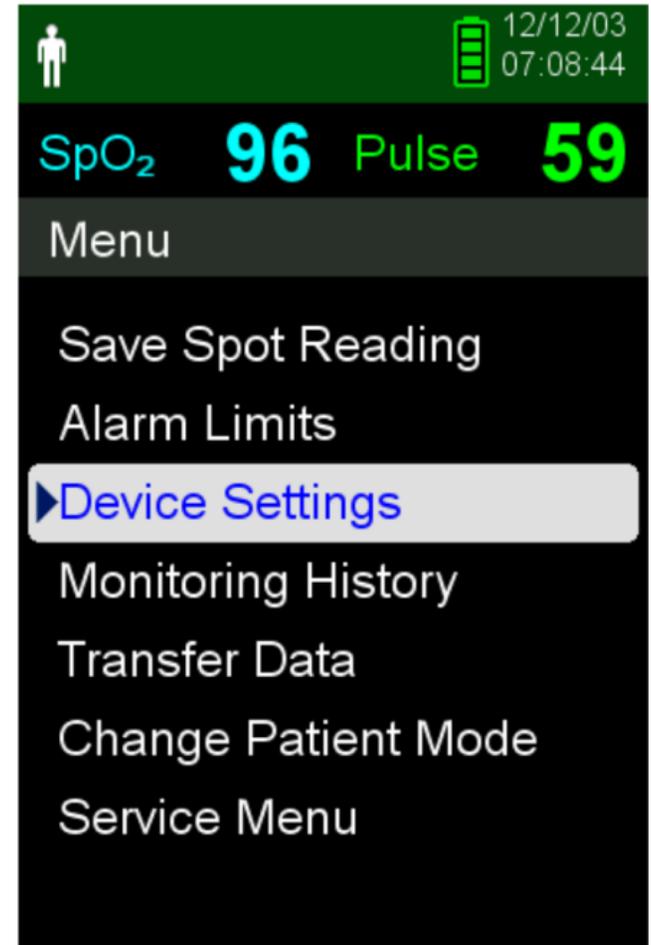


POX_20309_A

Regolazione della luminosità

Per regolare la luminosità dello schermo:

1. Nel menu Impostazioni del dispositivo, premere il tasto Su o Giù per evidenziare il menu Impostazioni luminosità e premere il tasto OK per selezionare il menu Impostazioni luminosità.
 - Premere il tasto Giù per diminuire la luminosità.
 - Premere il tasto Su per aumentare la luminosità.
2. Premere il tasto OK per salvare la luminosità desiderata.

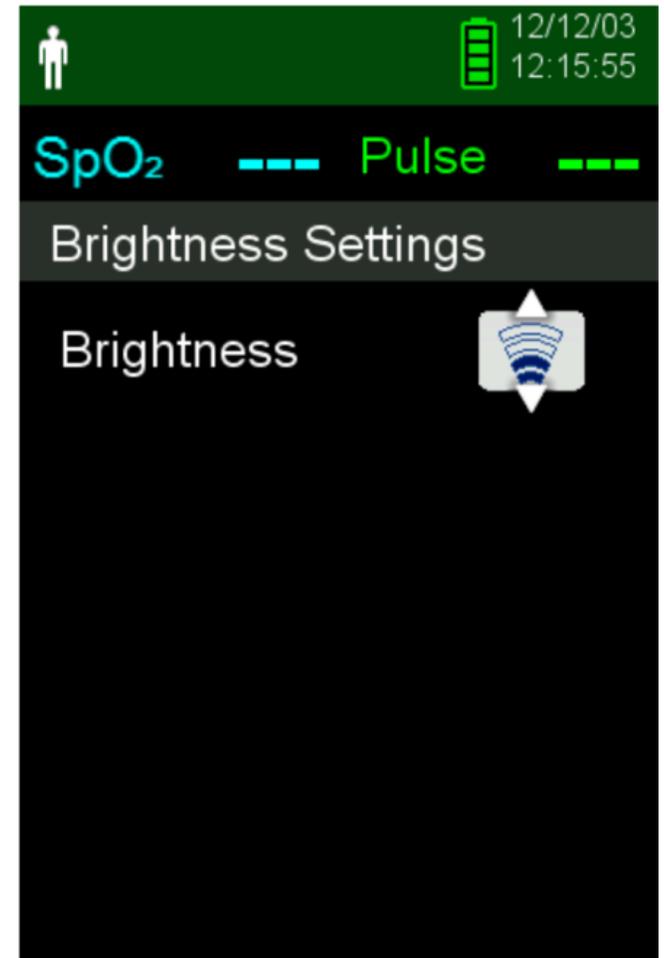


POX_20307_A

Regolazione volume segnali acustici

Per impostare il volume desiderato dei segnali acustici:

1. Premere il tasto Menu.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare il menu Impostazioni del dispositivo e premere il tasto OK per selezionare Impostazioni del dispositivo.
3. Selezionare il menu Impostazioni sonore.
4. Premere il tasto OK per selezionare il Volume dell'allarme.
5. Premere il tasto Giù e il tasto OK per evidenziare, e selezionare Volume pulsazioni o Volume segnali acustici importanti.
6. Regolare al livello di volume desiderato.
7. Premere il tasto OK per salvare il livello sonoro desiderato.

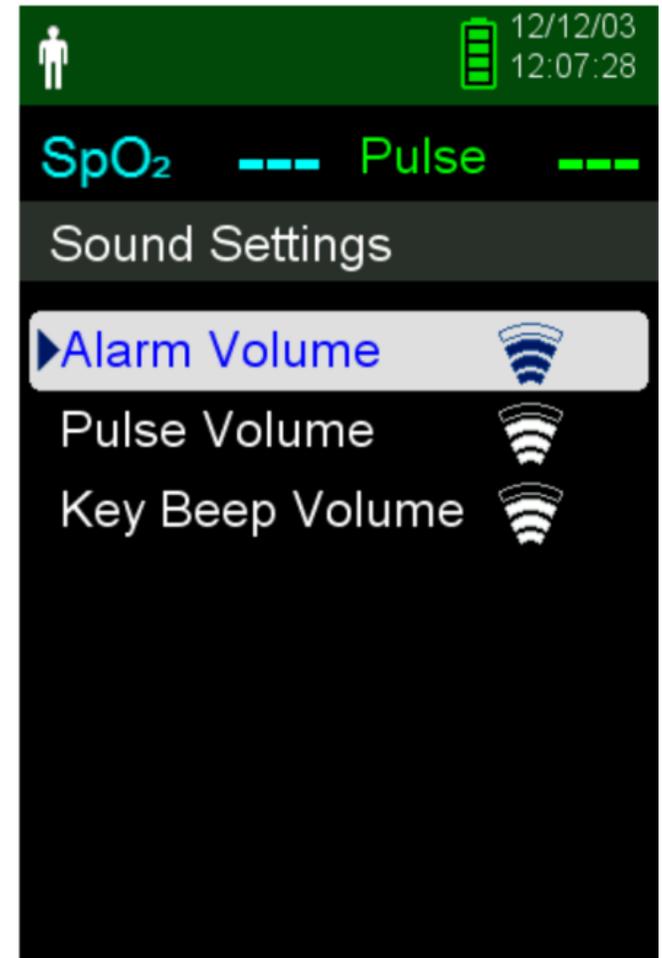

POX_20304_A


Gestione dei dati

Cronologia del monitoraggio

Il sistema di monitoraggio visualizza i dati trend in forma tabulare. I valori più recenti appaiono in alto.

Per rivedere la cronologia del monitoraggio:

1. Premere il tasto Menu.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare il menu Cronologia del monitoraggio, poi premere il tasto OK per selezionare il menu.
3. Nel menu Cronologia del monitoraggio, selezionare Visualizza dati spot o Visualizza dati in continuo.
4. Utilizzare la freccia in basso per scorrere l'elenco.
5. Regolare l'intervallo delle letture visualizzate premendo il tasto OK per visualizzare ogni 1, 5, 100 o 500 punti di rilevamento dati.

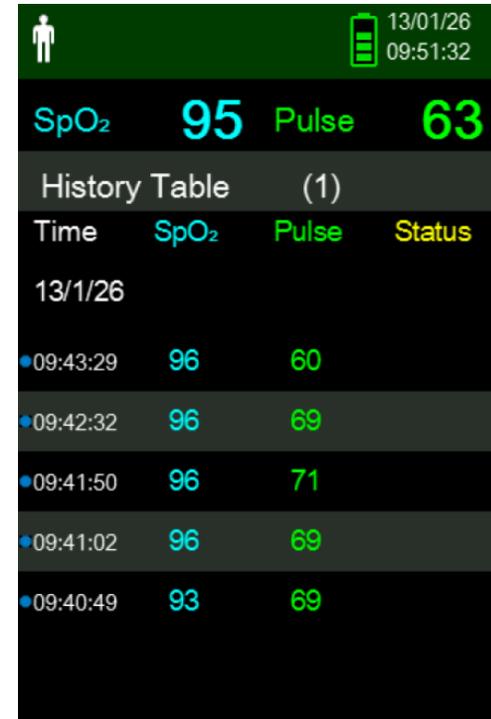

The screenshot shows a medical monitoring interface. At the top, there is a patient icon and a date/time display: 13/01/26 09:51:32. Below this, the current SpO2 is 95 and Pulse is 63. A 'History Table (1)' is displayed below, with columns for Time, SpO2, Pulse, and Status. The table contains five rows of data, with the most recent at the top.

Time	SpO2	Pulse	Status
13/1/26			
09:43:29	96	60	
09:42:32	96	69	
09:41:50	96	71	
09:41:02	96	69	
09:40:49	93	69	

POX_20322_A